



PROMETHEUS MEDICAL PELVIC SPLINT™

SAFEGUARD
MEDICAL™

PROMETHEUS
MEDICAL LTD

PROMETHEUS MEDICAL LTD

Prometheus Medical Ltd è un'azienda inglese leader nello sviluppo e nella produzione di dispositivi medici per l'emergenza pre-ospedaliera. Nota per la grande esperienza in campo militare e nella medicina di emergenza, produce dispositivi medici innovativi e di elevata qualità.

UN PRODOTTO RIVOLUZIONARIO PER LA STABILIZZAZIONE DELLE LESIONI PELVICHE

La riduzione e la stabilizzazione delle lesioni pelviche dovrebbe avvenire il prima possibile, in loco. Studi su pazienti che hanno riportato lesioni pelviche hanno dimostrato che un'immobilizzazione rapida riduce il rischio emorragia stabilizzando le estremità ossee fratturate, riducendo il sanguinamento e stabilizzando la formazione di coaguli.

Prometheus Pelvic Splint™, progettato per l'uso pre-ospedaliero, è molto leggero e facilmente regolabile. Realizzato in neoprene e senza cuciture interne, permette

l'immobilizzazione del bacino, riducendo al minimo i punti di pressione e, di conseguenza, il rischio di necrosi.

La procedura d'immobilizzazione con Prometheus Pelvic Splint™ è rapida, semplice e sicura. La fascia viene posizionata all'altezza dei grandi trocanteri e, grazie al suo piccolo spessore, i soccorritori riescono a farla passare sotto il bacino del paziente, operando una minima rotazione dello stesso ed evitando così l'espansione dei coaguli di sangue. La cintura viene poi avvolta sul bacino del paziente e i triangoli di fissaggio vengono posizionati sui grandi trocanteri. Avere dei riferimenti fissi, permette di effettuare le manovre successive in modo simmetrico. A questo punto, è possibile tagliare la fascia in neoprene della misura corretta: anteriormente è presente soltanto il materiale di fissaggio (largo soltanto 50 mm). Ciò consente un maggiore accesso alla regione inguinale e all'uretra per cateterismo urinario e/o accesso alla vena/arteria femorale. Infine, è possibile regolare la tensione della cintura pelvica tirando entrambe le cinghie di regolazione.

Prometheus Pelvic Splint™ è adatto per il trattamento delle lesioni pelviche, dal paziente pediatrico fino a quello bariatrico.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	Neoprene 6 mm, senza cuciture, stretch, con passante in nylon
Peso:	100 gr
Dimensioni imbracatura in neoprene:	126x19 cm
Dimensioni passante:	5x3 cm
Dimensioni ancoraggio triangolare:	10X18 cm
Dimensioni ancoraggio rettangolare:	13x10 cm
Dimensioni cinghia in velcro:	43x5 cm
Tipologia di pazienti:	Da paziente pediatrico fino al paziente adulto con circonferenza massima di 152 cm
Trattamento del paziente:	Parte anteriore libera: permette l'accesso all'addome e all'inguine. Perineo e ano sono lasciati scoperti
Facilità di applicazione e regolazione:	La fascia in neoprene si taglia facilmente