

EasyFlow nCPAP

Sistema di ventilazione non invasiva



Istruzioni per l'uso

Queste istruzioni per l'uso integrano le istruzioni per l'uso dei respiratori pediatrici

- **STEPHANIE**
- **SOPHIE**
- **CHRISTINA**
- **F120 MOBIL E GT**
- **CPAP**
- **EVE_{IN}, EVE_{TR} E EVE_{NEO}**

di **FRITZ STEPHAN GMBH** e fornisce informazioni sull'uso del **SISTEMA EASYFLOW NCPAP** con i seguenti sistemi di ventilazione:

- **BABYLOG® VN500 - DRÄGER AG & Co. KGAA**
- **BABYLOG® 8000 PLUS - DRÄGER AG & Co. KGAA**
- **SERVO-I / SERVO-N - MAQUET GMBH & Co. KG**
- **LEONI PLUS / LEONI II - MOBIL -
LÖWENSTEIN MEDICAL GMBH & Co. KG**
- **FABIAN+ NCPAP / FABIAN EVOLUTION/FABIAN HFO -
ACUTRONIC MEDICAL SYSTEMS AG**
- **BUBBLE CPAP (BC161) - FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED**
- **AVEA® - CAREFUSION GMBH**
- **SLE 6000 - SLE LIMITED**

Indice

Indice.....	3
1 Informazioni generali.....	5
1.1 Denominazione del prodotto e fabbricante.....	5
1.2 Combinazione di prodotti	6
1.3 Scopo previsto	7
1.4 Controindicazioni	7
1.5 Durata di utilizzo e smaltimento.....	8
1.6 Dati tecnici.....	8
1.6.1 Cannula, maschera, applicatore, tappo di chiusura, tubi di disaccoppiamento e connettori.....	8
1.6.2 Cuffietta, nastro testa e base frontale	9
1.7 Icone	9
2 Indicazioni di sicurezza.....	11
3 Uso del sistema EasyFlow nCPAP	12
3.1 Struttura	14
3.2 Applicazione del sistema EasyFlow nCPAP con cuffietta	15
3.3 Applicazione del sistema EasyFlow nCPAP con nastro testa	19
3.4 Conclusione della terapia.....	23
4 Funzionamento con diversi respiratori.....	25
4.1 Funzionamento con respiratori di Fritz Stephan GmbH.....	25
4.2 Funzionamento con prodotti di altri fabbricanti	26
4.2.1 Istruzioni per l'uso del respiratore Leoni Plus	27
5 Componenti e accessori	29
5.1 Cuffiette.....	29
5.2 Nastri testa	30
5.3 Cannule binasali	30
5.4 Maschere.....	30
5.5 Accessori	31
6 Elenco delle figure	33
7 Elenco delle tabelle	35
8 Appunti	37

1 Informazioni generali

1.1 Denominazione del prodotto e fabbricante

Denominazione del prodotto EASYFLOW nCPAP

Produzione e fabbricazione Fritz Stephan GmbH
 - Medizintechnik -
 Kirchstraße 19
 56412 Gackebach
 Germania

☎ (+)49 (6439) 9125-0
 📄 (+)49 (6439) 9125-111
 ✉ info@stephan-gmbh.com
 🌐 www.stephan-gmbh.com

Componenti singoli di Easy Flow nCPAP

Denominazione	Produttore	
Maschera o cannula (diverse dimensioni); prolunga	Fritz Stephan GmbH Gackebach	CE 0482
Applicatore con tappo di chiusura a pressione	Fritz Stephan GmbH Gackebach	CE 0482
Set flessibile di disaccoppiamento con connettori (Ø 10 e 12 mm)	Fritz Stephan GmbH Gackebach	CE 0482
Cuffietta con base frontale e nastrino di fissaggio (diverse dimensioni)	Fritz Stephan GmbH Gackebach	CE
Nastro testa con base frontale, cuscinetto proteggifronte e nastrino di fissaggio (diverse dimensioni)	Fritz Stephan GmbH Gackebach	CE

Tab. 1 - Componenti singoli di EasyFlow nCPAP

1.2 Combinazione di prodotti

L'azienda FRITZ STEPHAN GMBH declina qualsiasi responsabilità qualora siano impiegate combinazioni di dispositivi non consentite con prodotti non approvati dal produttore o non certificati come compatibili dal produttore.

Combinazioni di prodotti consentite

Il sistema EasyFlow nCPAP è destinato all'uso con i seguenti prodotti di Fritz Stephan GmbH:

- Respiratore neonatale Stephanie
- Respiratore neonatale Sophie
- Respiratore neonatale Christina
- Rianimatore F120 Mobil e GT
- Sistema CPAP Easy, Easy plus, Compact
- EVE_{IN}, EVE_{TR} e EVE_{Neo}

La combinazione di EasyFlow nCPAP con l'umidificatore Fisher & Paykel MR850, la camera umidificatore MR290 e il sistema di tubi RT235 è stata testata e approvata con successo da Fritz Stephan GmbH con i seguenti prodotti:

- Babylog® VN500 - Dräger AG & Co. KGaA
- Babylog® 8000 plus - Dräger AG & Co. KGaA
- Servo-i / Servo-n - Maquet GmbH & Co. KG
- Leoni Plus / Leoni II - Mobil - Löwenstein Medical GmbH & Co. KG
- Fabian+ nCPAP / Fabian Evolution/Fabian HFO - Acutronic Medical Systems AG
- Bubble CPAP (BC161) - Fisher & Paykel Healthcare Limited
- AVEA® - CareFusion GmbH

La combinazione di EasyFlow nCPAP con l'umidificatore Wilamed Aircon e il sistema di tubi Intersurgical BC6188/10 mm è stata testata e approvata con successo da Fritz Stephan GmbH con i seguenti prodotti:

- SLE 6000 - SLE Limited

1.3 Scopo previsto

Campo di impiego e applicazione **EASYFLOW NCPAP** è un accessorio per l'applicazione della ventilazione non invasiva per prematuri e neonati, lattanti e bambini piccoli che hanno una respirazione spontanea sufficiente per la ventilazione non invasiva.

ATTENZIONE



A causa delle perdite di grande entità, con **EASYFLOW NCPAP** non è possibile sincronizzazione efficace della respirazione meccanica con il metodo di trigger a pressione differenziale. A seconda del ventilatore meccanico utilizzato, è possibile utilizzare un sensore di respirazione esterno per la sincronizzazione, come, ad esempio, il sensore di respirazione addominale (cod. art. 103560103) di Fritz Stephan GmbH.

NOTA



L'uso del **SISTEMA EASYFLOW NCPAP** richiede una conoscenza accurata e l'osservanza di queste istruzioni per l'uso. Il sistema è destinato esclusivamente all'uso descritto. Ogni **SISTEMA EASYFLOW NCPAP** include un breve manuale operativo.

1.4 Controindicazioni

La ventilazione non invasiva non è idonea per pazienti senza sufficiente respirazione spontanea (ad es. difetti al diaframma o alle pareti dello stomaco, aspirazione di meconio e asfissia grave post-partum).

Altre controindicazioni sono:

- Coma
- Delirium
- Paziente non collaborante
- Grave instabilità emodinamica
- Secrezione eccessiva delle vie respiratorie
- Aspirazione frequente
- Aumento del rischio di aspirazione
- Trauma cranico facciale, deformità facciale
- Ostruzione delle vie respiratorie superiori

1.5 Durata di utilizzo e smaltimento

La terapia deve essere iniziata con una maschera. I pazienti sono inizialmente molto più tranquilli in caso di impiego della maschera rispetto all'impiego della cannula. Un cambio tra cannula e maschera deve avvenire ogni 6-8 ore. Dopo il cambio, la maschera o la cannula possono essere conservate in un ambiente igienicamente pulito, come un guanto monouso. La durata totale di utilizzo di un sistema non deve superare i 7 giorni. La durata di utilizzo dipende dalla modalità di ventilazione, dalla somministrazione del farmaco e dalle impostazioni dell'umidificatore.

Dopo l'uso, i componenti del sistema **EASYFLOW NCPAP** devono essere smaltiti in conformità alle norme locali relative alla protezione contro le infezioni.

1.6 Dati tecnici











1.6.1 Cannula, maschera, applicatore, tappo di chiusura, tubi di disaccoppiamento e connettori

Aspetti generali	Classificazione sec. CEE/93/42	II a
	Codice UMDNS	11-001
	Peso	circa 20 g
	Connettori	Tubi di ventilazione Ø 10 e 12 mm
	Volume dello spazio morto	5 ml
	Resistenza espiratoria a 5 l/min	0,22 kPa
Materiali	Applicatore	MABS
	Tappo di chiusura a pressione	Silicone
	Cannula	Silicone
	Maschera	Silicone
	Tubi di disaccoppiamento	PE
	Connettori	PP

1.6.2 Cuffietta, nastro testa e base frontale

Aspetti generali	Classificazione sec. CEE/93/42	I
Materiali	Cuffietta	Poliestere
	Nastro testa	Poliestere e poliuretano
	Magnete	NdFeB
	Base frontale	Polipropilene
	Disco	Acciaio inox

1.7 Icone

Simbolo	Significato	Simbolo	Significato
	Non riutilizzare		Rispettare le istruzioni per l'uso
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata		Scadenza:
	Conservare in luogo asciutto		Produttore
	Rispettare le condizioni di conservazione		Codice lotto
	Sterilizzazione con ossido di etilene		Codice articolo

Tab. 2 - Icone

2 Indicazioni di sicurezza

Le seguenti indicazioni di sicurezza vengono ripetute nei punti rilevanti delle istruzioni per l'uso e devono essere assolutamente rispettate.

PERICOLO



Indica situazioni potenzialmente pericolose che possono causare la morte o ferite mortali qualora non vengano evitate.

AVVERTENZA



Indica situazioni potenzialmente pericolose che possono causare la morte o ferite gravi qualora non vengano evitate.

ATTENZIONE



Indica situazioni potenzialmente pericolose che possono causare ferite di entità lieve o moderata qualora non vengano evitate.

AVVISO

Indica situazioni potenzialmente pericolose che, qualora non vengano evitate, possono causare ferite di entità lieve o moderata al paziente o all'operatore, nonché danni al dispositivo medicale.

NOTA



Indica ulteriori informazioni mirate a semplificare l'uso del dispositivo medicale e ad evitare problemi durante la sua manipolazione.

3 Uso del sistema EasyFlow nCPAP

ATTENZIONE



Il sistema **EASYFLOW NCPAP** è fornito in confezione sterile. Non utilizzare se la confezione o il sistema sono danneggiati.

ATTENZIONE



Il **SISTEMA EASYFLOW NCPAP** è un prodotto monouso. Se ne sconsiglia il riutilizzo. Il riutilizzo danneggia il materiale e può portare al malfunzionamento del sistema. È sconsigliato anche il riutilizzo delle basi frontali e delle cuffiette. Le connessioni adesive e in velcro possono perdere aderenza; in tal caso non viene più fornita una presa sicura del sistema.

ATTENZIONE



Controllare che la cannula o la maschera siano della misura corretta.
Un posizionamento errato può causare lesioni da pressione! Un cambio regolare tra maschera e cannula allevia i punti di contatto sulla pelle.
Le cannule non devono essere tagliate o accorciate!
I bordi tagliati risultanti possono danneggiare la mucosa!
Le particelle di silicone risultanti potrebbero penetrare nei polmoni durante la ventilazione!
Le cannule possono essere inserite solo in misura tale che il corpo cordonato non tocchi la punta del naso! Il contatto diretto può causare lesioni da pressione.
Controllare la cannula o la maschera a intervalli regolari per verificare la presenza di accumuli di secrezioni! Gli accumuli di secrezioni possono causare ostruzioni e compromettere la ventilazione.

NOTA



Selezionare una cuffietta o un nastro testa adatto e applicarlo sul paziente.
Le diverse dimensioni sono codificate per colore o etichettate di conseguenza e sono riportate nell'elenco dei componenti (vedere il capitolo 5). Assicurarsi che le orecchie si adattino bene e che il tessuto non sia ripiegato.
Una cuffietta troppo piccola può causare la deformazione della testa!
Una cuffietta troppo grande può scivolare facilmente e quindi compromettere il posizionamento del sistema.

ATTENZIONE

Non stringere eccessivamente i nastri testa e i nastri di fissaggio!
Il posizionamento della maschera o della cannula avviene mediante la base frontale. Nastri di fissaggio troppo tesi possono causare lesioni da pressione.
Un eccessivo tensionamento dei nastri di fissaggio può causare la deformazione del corpo cordonato della maschera o della cannula e quindi compromettere la ventilazione.

NOTA

I tubi di ventilazione del respiratore possono anche essere collegati direttamente all'applicatore. Tuttavia, Fritz Stephan GmbH raccomanda vivamente l'uso di tubi di disaccoppiamento per lo scarico della trazione. Ciò garantisce una migliore aderenza della cannula o della maschera e un comfort di utilizzo significativamente maggiore per il paziente.

3.1 Struttura

Il SISTEMA EASYFLOW nCPAP è un prodotto monouso composto da applicatore, base frontale e cannula o maschera. Il sistema è fissato tramite una cuffietta o un nastro testa e nastri di fissaggio. Facoltativamente, i tubi di disaccoppiamento possono essere collegati ai tubi di ventilazione del rispettivo respiratore mediante connettori per uno scarico ottimale della trazione.

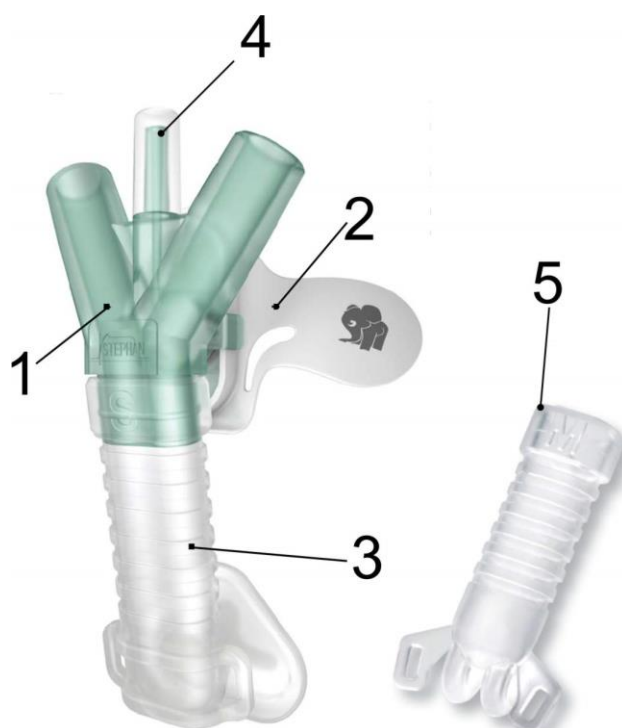


Fig. 1 - Sistema EasyFlow nCPAP

- | | | | |
|---|---------------|---|-------------------------------|
| 1 | Applicatore | 4 | Tappo di chiusura a pressione |
| 2 | Base frontale | 5 | Cannula |
| 3 | Maschera | | |

3.2 Applicazione del sistema EasyFlow nCPAP con cuffietta

Maschera

1. Misurare la circonferenza della testa per determinare la dimensione della cuffietta.
2. Inserire la maschera sull'applicatore.
3. Applicare il nastrino di fissaggio all'attacco laterale della maschera.
4. Posizionare correttamente la cuffietta sul paziente.
5. Posizionare la base frontale sulla superficie di appoggio della cuffietta.
6. La maschera con applicatore può ora essere posizionata con attenzione sul naso del paziente. Il magnete dell'applicatore viene posto sul disco metallico della base frontale e forma una connessione fissa.
7. Fissare il nastrino di fissaggio sui supporti laterali in velcro della cuffietta.
8. Se necessario, il nastrino di fissaggio può essere accorciato. In tal caso prestare attenzione alla corretta aderenza della maschera. Se necessario, ridurre la pressione del sistema sul viso del paziente.
9. Collegare i tubi di disaccoppiamento all'applicatore e al sistema di tubi respiratori.

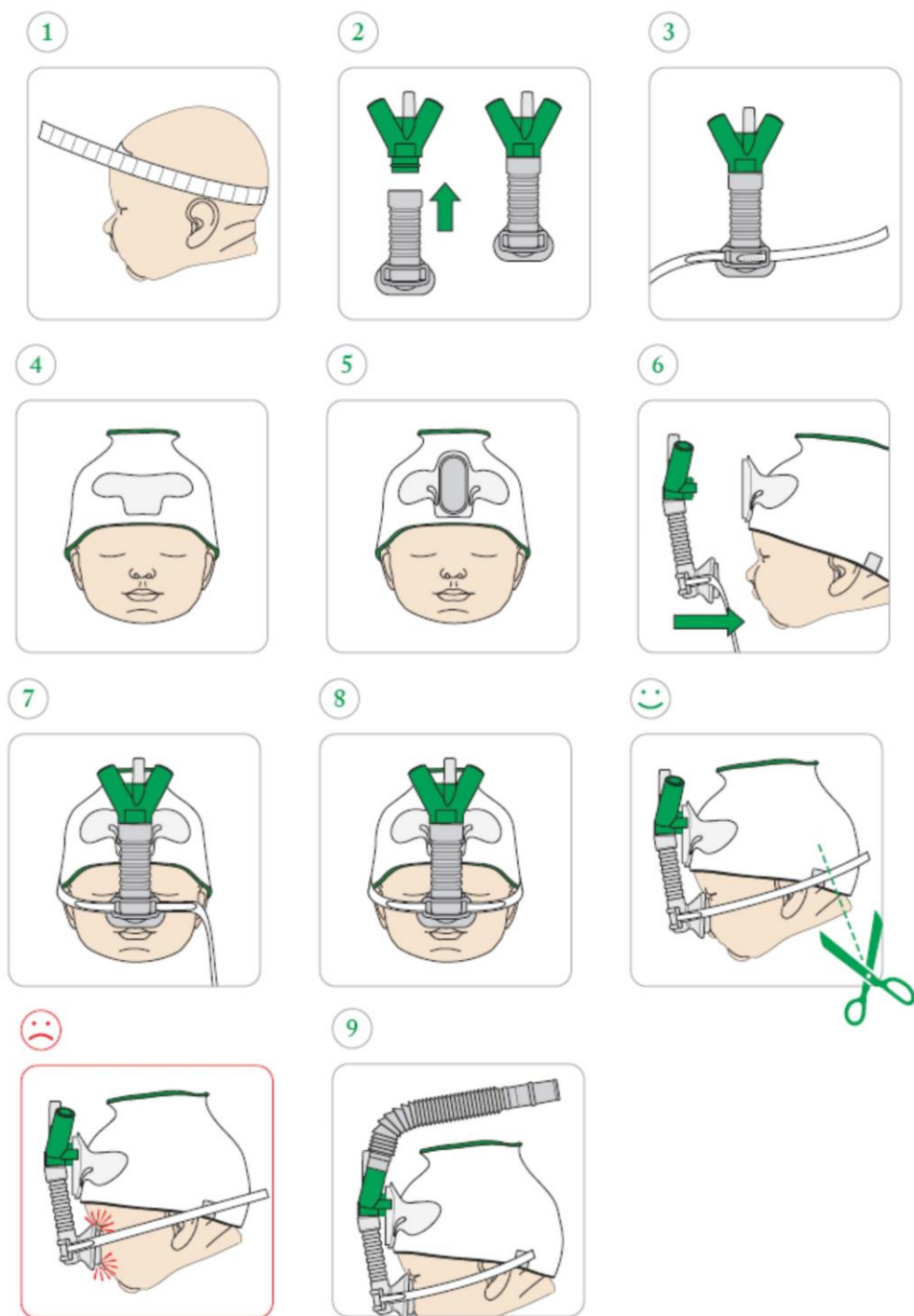


Fig. 2 - Applicazione del sistema EasyFlow NCPAP (maschera)

Cannula

1. Misurare la circonferenza della testa per determinare la dimensione della cuffietta.
2. Il modello per maschere e cannule permette di determinare la dimensione della cannula.
3. Inserire la cannula sull'applicatore.
4. Applicare il nastrino di fissaggio all'attacco laterale delle cannule.
5. Posizionare correttamente la cuffietta sul paziente.
6. Posizionare la base frontale sulla superficie di appoggio della cuffietta.
7. La cannula con applicatore può ora essere posizionata con attenzione nelle narici del paziente.
8. Il magnete dell'applicatore viene posto sul disco metallico della base frontale e forma una connessione fissa per un migliore posizionamento del sistema.
9. Fissare il nastrino di fissaggio sui supporti laterali in velcro della cuffietta. Se necessario, il nastrino di fissaggio può essere accorciato. Prestare attenzione al posizionamento della cannula. Se necessario, ridurre la pressione del sistema sul viso del paziente.
10. Collegare i tubi di disaccoppiamento all'applicatore e al sistema di tubi respiratori.

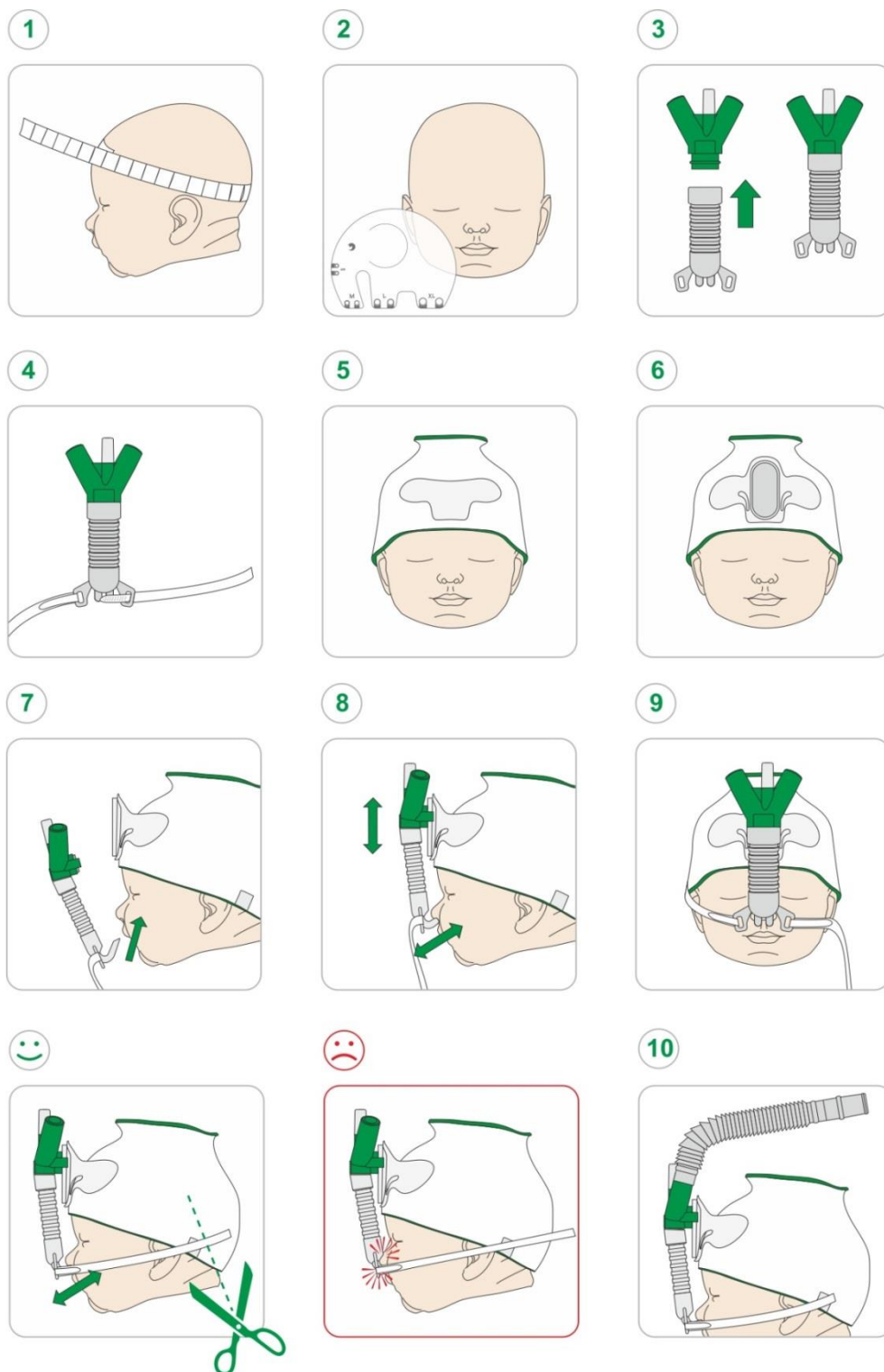


Fig. 3 - Applicazione del sistema EasyFlow NCPAP (cannula)

3.3 Applicazione del sistema EasyFlow nCPAP con nastro testa

Maschera:

1. Inserire la maschera sull'applicatore.
2. Applicare il nastrino di fissaggio all'attacco laterale della maschera.
3. Preparare il cuscinetto per base frontale rimuovendo la pellicola protettiva del gel di silicone.
4. Posizionare il cuscinetto per base frontale sulla fronte del paziente.
5. Posizionare la base frontale sul cuscinetto per base frontale.
6. Posizionare con attenzione la fascia per fronte sotto la testa del paziente.
7. Fissare le estremità della fascia per fronte alle superfici in velcro della base frontale.
8. La maschera con applicatore può ora essere posizionata con attenzione sul naso del paziente.
9. Il magnete dell'applicatore viene posto sul disco metallico della base frontale e forma una connessione fissa.
10. Fissare il nastrino di fissaggio sui supporti laterali in velcro della fascia per fronte. Prestare attenzione alla corretta aderenza della maschera; se necessario, ridurre la pressione del sistema sull'area del viso del paziente.
11. Collegare i tubi di disaccoppiamento all'applicatore e al sistema di tubi respiratori.

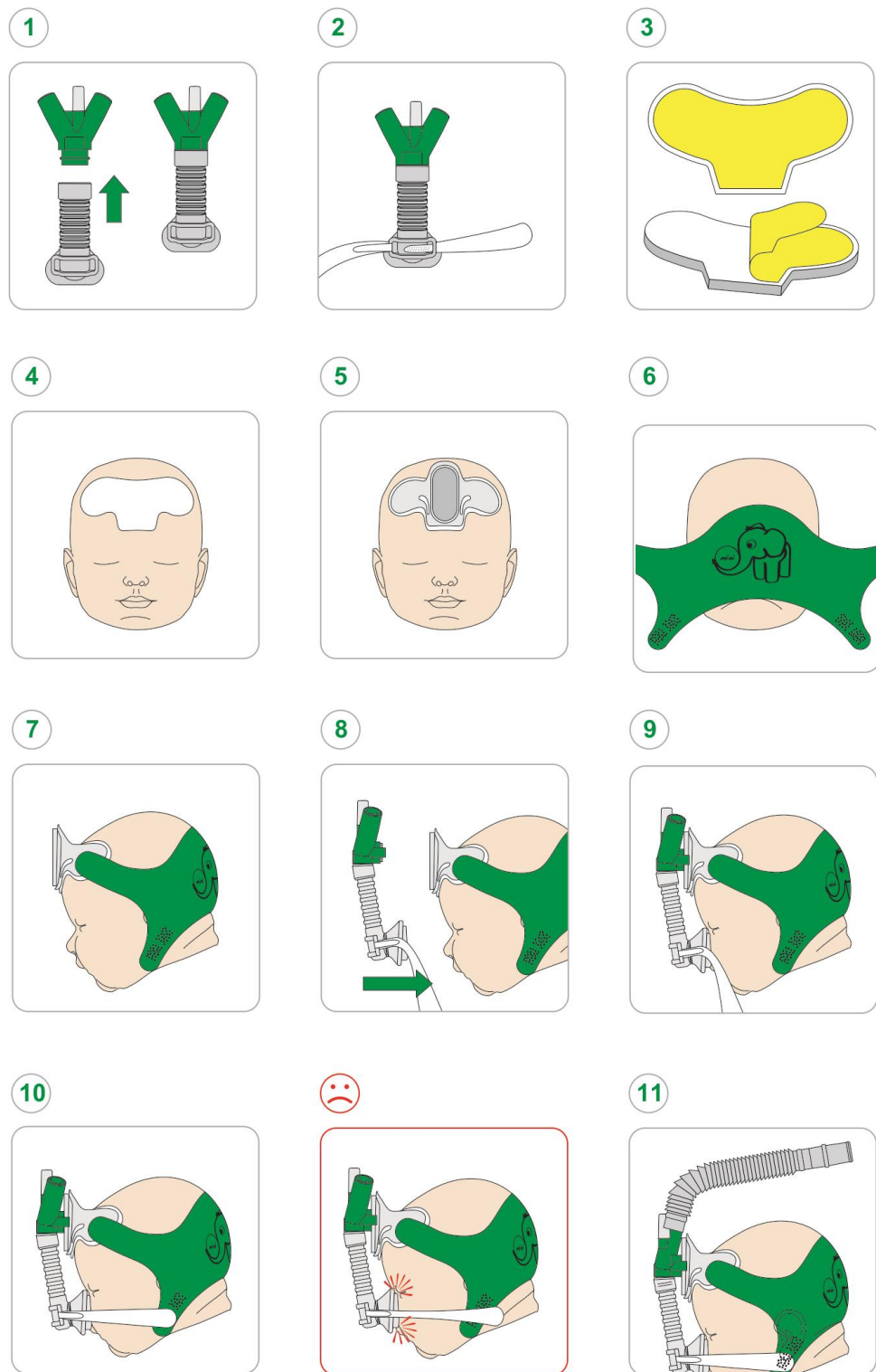


Fig. 4 - Applicazione del sistema EasyFlow NCPAP (maschera)

Cannula

1. Inserire la cannula sull'applicatore.
2. Applicare il nastrino di fissaggio all'attacco laterale della cannula.
3. Preparare il cuscinetto per base frontale rimuovendo la pellicola protettiva del gel di silicone.
4. Posizionare il cuscinetto per base frontale sulla fronte del paziente.
5. Posizionare la base frontale sul cuscinetto per base frontale.
6. Posizionare con attenzione la fascia per fronte sotto la testa del paziente.
7. Fissare le estremità della fascia per fronte alle superfici in velcro della base frontale.
8. La cannula con applicatore può ora essere posizionata con attenzione sul naso del paziente.
9. Il magnete dell'applicatore viene posto sul disco metallico della base frontale e forma una connessione fissa. La posizione della cannula può essere regolata spostando l'applicatore.
10. Fissare il nastrino di fissaggio sui supporti laterali in velcro della fascia per fronte. Prestare attenzione alla corretta aderenza della cannula; se necessario, ridurre la pressione del sistema sull'area del viso del paziente.
11. Collegare i tubi di disaccoppiamento all'applicatore e al sistema di tubi respiratori.

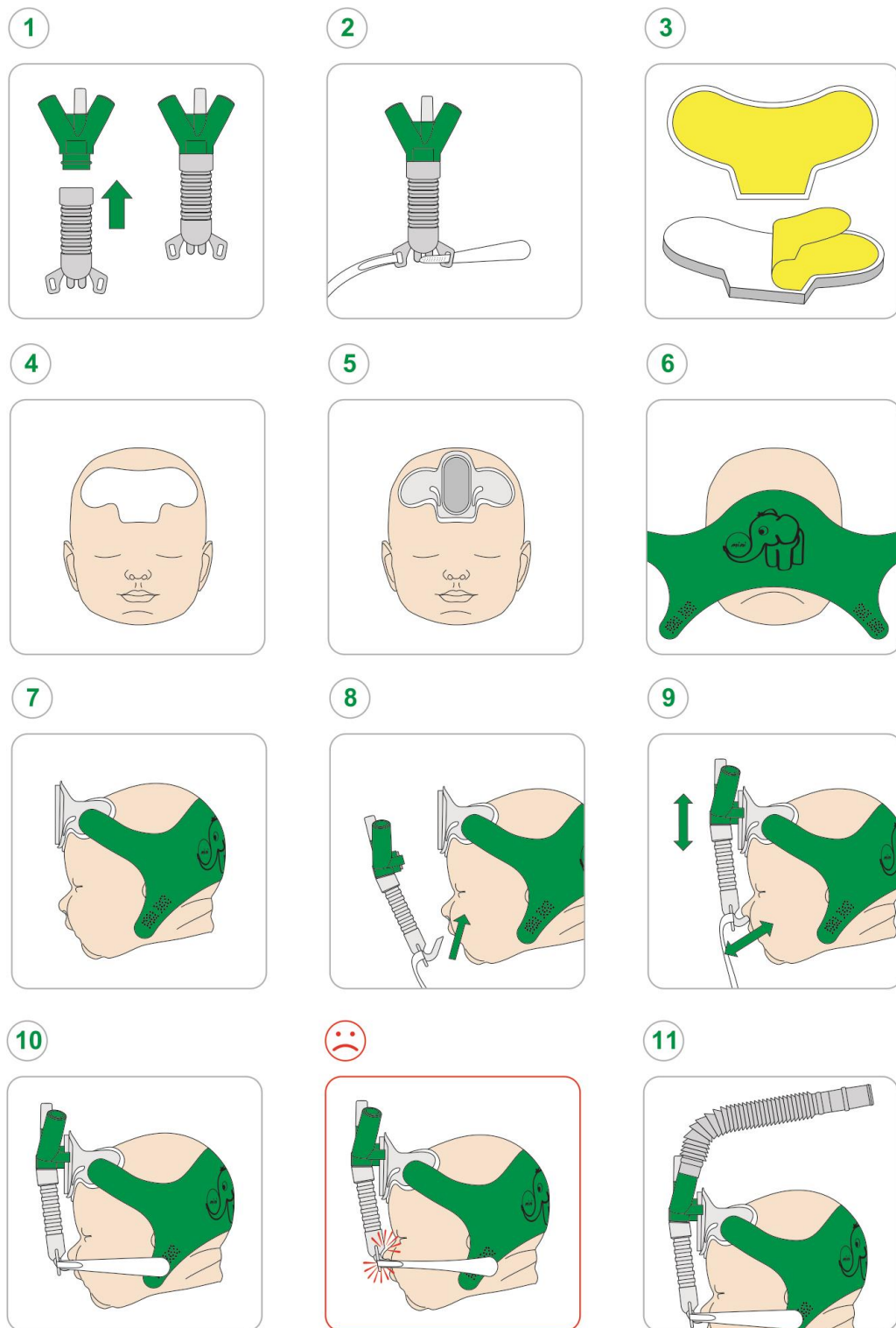


Fig. 5 - Applicazione del sistema EasyFlow NCPAP (cannula)

3.4 Conclusione della terapia

- Allentare il nastrino di fissaggio della cuffietta
- Rimuovere la cannula o la maschera con l'applicatore.
- Rimuovere la cuffietta / il nastro testa.
- Smaltire tutti gli articoli usati.

4 Funzionamento con diversi respiratori

4.1 Funzionamento con respiratori di Fritz Stephan GmbH

NOTA

Le seguenti istruzioni per il collegamento del SISTEMA EASYFLOW NCPAP si applicano ai prodotti di Fritz Stephan GmbH:



- CPAP
- CHRISTINA
- F120 MOBIL
- F120 GT
- STEPHANIE
- SOPHIE
- EVE_{IN}, EVE_{TR} E EVE_{NEO}

Preparare e mettere in funzione il prodotto selezionato secondo le rispettive istruzioni per l'uso.

Collegare il sistema EASYFLOW NCPAP al sistema di tubi come descritto nel capitolo 3.2 o 3.3.

Impostare la modalità di ventilazione non invasiva e selezionare i parametri di ventilazione.

Avvia ventilazione.

4.2 Funzionamento con prodotti di altri fabbricanti

NOTA

Le seguenti istruzioni per il collegamento del **SISTEMA EASYFLOW NCPAP** si applicano ai respiratori:



- Babylog® VN500 - Dräger AG & Co. KGaA
- Babylog® 8000 plus - Dräger AG & Co. KGaA
- Servo-i / Servo-n - Maquet GmbH & Co. KG
- Leoni Plus - Löwenstein Medical GmbH & Co. KG
(consultare il capitolo 4.2.1)
- Leoni II / Mobil - Löwenstein Medical GmbH & Co. KG
- Fabian+ nCPAP / Fabian Evolution/Fabian HFO -
Acutronic Medical Systems AG
- Bubble CPAP (BC161) - Fisher & Paykel Healthcare Limited.
- AVEA® - CareFusion GmbH
- SLE 6000 - SLE Limited

Collegare il respiratore all'umidificatore secondo le istruzioni per l'uso.

Collegare il relativo sistema di tubi conformemente alle corrispondenti istruzioni per l'uso.

Mettere in funzione il prodotto selezionato secondo le istruzioni per l'uso.

Collegare il sistema **EASYFLOW NCPAP** al sistema di tubi come descritto nel capitolo 3.2 o 3.3. A tal fine, utilizzare i tubi di disaccoppiamento con l'adattatore corrispondente (10 mm o 12 mm). Il raccordo a Y del sistema di tubi deve essere rimosso. I tubi di inspirazione ed espirazione devono essere collegati a un'estremità del tubo di disaccoppiamento mediante adattatori. Il sistema può ora essere messo in funzione secondo le istruzioni per l'uso applicabili.



Fig. 6 - Collegamento con l'adattatore Fisher & Paykel

- Impostare la modalità di ventilazione non invasiva (nCPAP) e preselezionare i parametri di ventilazione.
- Avvia ventilazione

4.2.1 Istruzioni per l'uso del respiratore Leoni Plus

Per l'applicazione dei sistemi nCPAP, il ventilatore meccanico Leoni Plus offre le modalità nCPAP e nIPPV, in cui la misurazione del flusso viene automaticamente disattivata e gli allarmi vengono adattati ai tassi di perdita tipicamente aumentati. La funzione "AutoFlow" disponibile per gli accessori originali NeoJet di Löwenstein Medical GmbH & Co. KG seleziona il flusso ottimale per la pressione delle vie aeree desiderata con l'aiuto della curva caratteristica del flusso di pressione memorizzata internamente.

A causa del minor tasso di perdita correlato al sistema EasyFlow nCPAP e della curva caratteristica distintamente diversa, "AutoFlow" non è più in grado di applicare correttamente la pressione desiderata. Il fabbricante consiglia quindi di disattivare "AutoFlow" e di impostare il flusso manualmente.

Per poter comunque utilizzare la funzione "AutoFlow", Fritz Stephan GmbH ha sviluppato un set flessibile di disaccoppiamento specifico per l'uso con Leoni Plus. Questo può essere inserito nella linea espiratoria del sistema Easyflow nCPAP e genera una perdita espiratoria che corrisponde approssimativamente alla "perdita di sistema" del NeoJet. Il set flessibile di disaccoppiamento può essere ordinato con il codice articolo 170163410 di Fritz Stephan GmbH.

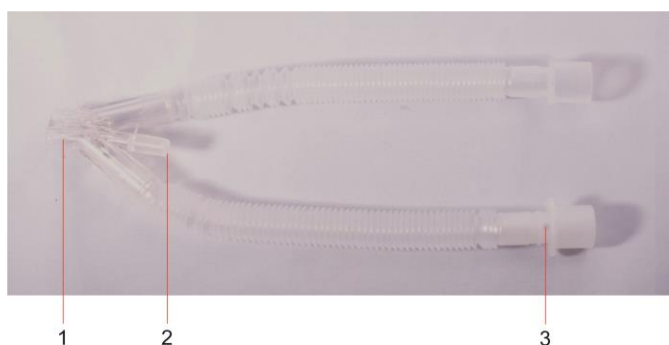




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







Fig. 7 - Adattatore di tenuta nella linea espiratoria

- | | | | |
|---|--|---|----------------------|
| 1 | Applicatore | 3 | Adattatore di tenuta |
| 2 | Collegamento tubo di misurazione della pressione | | |

5 Componenti e accessori

5.1 Cuffiette

Cuffiette con base frontale e nastrino di fissaggio					
Misura	Colore	Circonferenza della testa	Peso	Quantità	Cod. art.
XS		20-22 cm	500-700 g	1	1 701 61 019
S		22-24 cm	700-900 g	1	1 701 61 020
M		24-26 cm	900-1200 g	1	1 701 61 021
L		26-28 cm	1200-1600 g	1	1 701 61 022
XL		28-30 cm	1600-2400 g	1	1 701 61 023
XXL		30-33 cm	2400-3000 g	1	1 701 61 024
3XL		33-36 cm	3000-4200 g	1	1 701 61 025
4XL		36-39 cm	4200-6000 g	1	1 701 61 026
5XL		39-42 cm	6000-7300 g	1	1 701 61 027
6XL		42-45 cm	7300-8800 g	1	1 701 61 028
7XL		45-48 cm	> 8800 g	1	1 701 61 029

Tab. 3 - Cuffiette

5.2 Nastri testa

Nastro testa con base frontale e due nastri di fissaggio

Misura	Circonferenza della testa	Peso	Quantità	Cod. art.
Micro	20-28 cm	500-1350 g	1	1 701 61 040
Mini	28-36 cm	1350-3700 g	1	1 701 61 041
Maxi	36-48 cm	3700-8400 g	1	1 701 61 042

Tab. 4 - Nastri testa

5.3 Cannule binasali

Denominazione	Quantità	Cod. art.
XXS	5	1 701 61 007
XS	5	1 701 61 006
S	5	1 701 61 001
M	5	1 701 61 002
L	5	1 701 61 003
XL	5	1 701 61 004

Tab. 5 - Cannule binasali

5.4 Maschere

Denominazione	Quantità	Cod. art.
XS	5	1 701 61 005
S	5	1 701 61 012
M	5	1 701 61 013
L	5	1 701 61 014
XL	5	1 701 61 015

Tab. 6 - Maschere

5.5 Accessori

Denominazione	Quantità	Cod. art.
Prolunga per maschera e cannula	5	1 701 61 000
Cuscinetto proteggifronte con gel di silicone	5	1 701 61 018
Cuscinetto proteggifronte senza gel di silicone	5	1 701 61 017
Base frontale per cuffiette	1	1 701 63 051
Base frontale per nastri testa	1	1 701 63 065
Applicatore con magnete e tappo di chiusura a pressione	5	1 701 61 161
Set flessibile di disaccoppiamento con connettori (Ø 10 mm)	5	1 701 63 408
Set flessibile di disaccoppiamento con connettori (Ø 12 mm, F&P)	5	1 701 63 409
Set flessibile di disaccoppiamento con connettori (Ø 12 mm, F&P) e adattatore di tenuta (Leoni)	5	1 701 63 410
Nastrino di fissaggio per cuffiette, regolabili con velcro	10	1 701 63 071
Nastrino di fissaggio (per nastro testa, micro e mini)	10	1 701 63 063
Nastrino di fissaggio (per nastro testa, maxi)	10	1 701 63 064
Nastro di misurazione per circonferenza della testa e lunghezza del corpo	1	1 701 60 074
Modello per dimensioni di maschere e cannule	1	1 701 60 020

Tab. 7 - Accessori

6 Elenco delle figure

Fig. 1 - Sistema EasyFlow nCPAP	14
Fig. 2 - Applicazione del sistema EasyFlow NCPAP (maschera)	16
Fig. 3 - Applicazione del sistema EasyFlow NCPAP (cannula)	18
Fig. 4 - Applicazione del sistema EasyFlow NCPAP (maschera)	20
Fig. 5 - Applicazione del sistema EasyFlow NCPAP (cannula)	22
Fig. 6 - Collegamento con l'adattatore Fisher & Paykel.....	26
Fig. 7 - Adattatore di tenuta nella linea espiratoria	27





7 Elenco delle tabelle

Tab. 1 - Componenti singoli di EasyFlow nCPAP.....	5
Tab. 2 - Icone	9
Tab. 3 - Cuffiette	29
Tab. 4 - Nastri testa.....	30
Tab. 5 - Cannule binasali	30
Tab. 6 - Maschere.....	30
Tab. 7 - Accessori	31

8 Appunti

FRITZ STEPHAN GMBH
- Medizintechnik -
Kirchstraße 19

56412 Gackenbach
Germania

 +49 (0)6439 9125-0
 +49 (0)6439 9125-111
 info@stephan-gmbh.com
 www.stephan-gmbh.com

Salvo modifiche tecniche.

Aggiornamento: Febbraio 2020

Versione: V3.6